

Chaise Mécano Médic, Installation facile en 4 étapes


Étape #1




Positionnez correctement la chaise sur la toilette.

Étape #2

Ajustez le pont à la même hauteur que la chaise en vissant ou dévissant les pattes les plus près de la chaise.

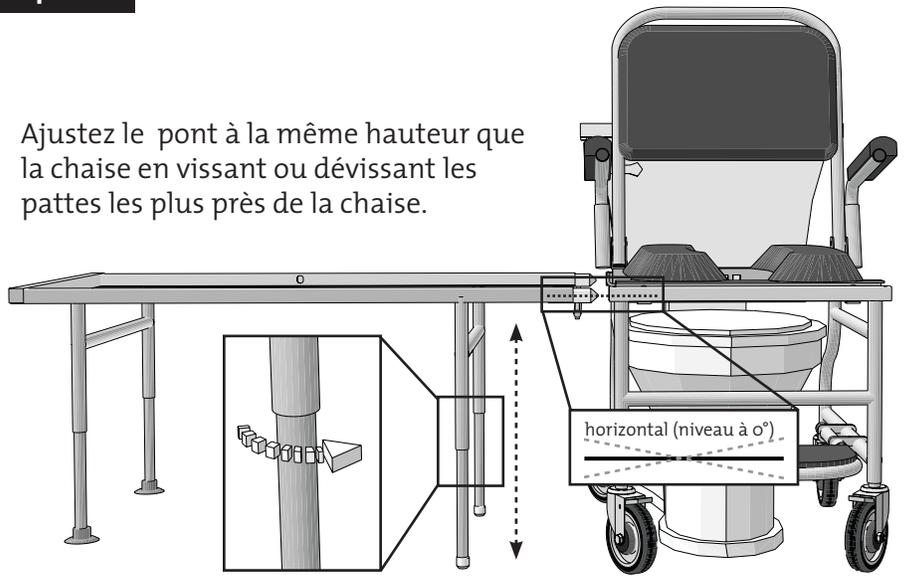


Étape #3

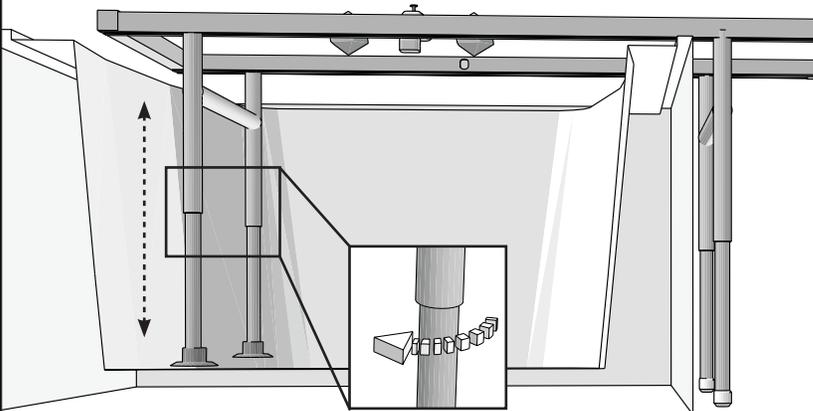

Comme les autres pattes, ajustez les pattes avec ventouse en vissant ou dévissant; les pattes dans le bain seront plus courtes. **Revérifiez le niveau horizontal.**

Étape #4

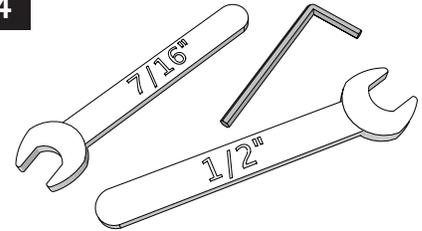


3 outils d'ajustement sont fournis avec la chaise de transfert. Ils serviront pour l'ajustement de la largeur du siège, de l'inclinaison du dossier et de la distance et position de l'appui-pied.


Comment faire les ajustements :

- 1) Desserrez les vis
 - 2) Ajustez à la position désirée
 - 3) Resserrez fermement pour garder la position.
- n.b. **Vérifiez régulièrement le serrage.**


Dossier : clé 1/2" (4 vis)

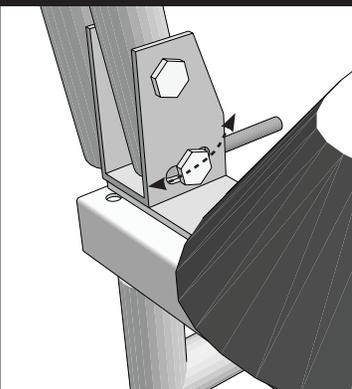

Assise (siège) : clé 7/16" (4 vis)

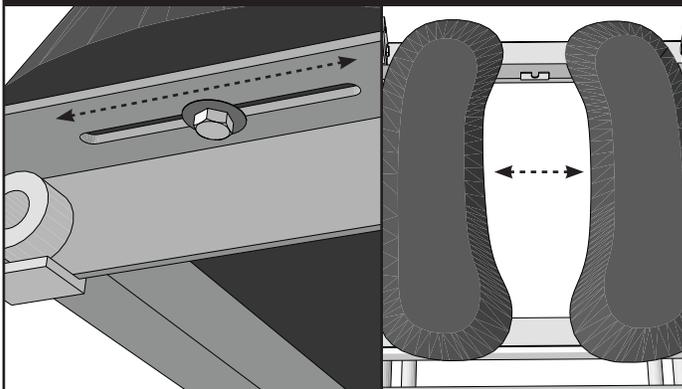

Appui-pied : clé Allen exagonale 5/32" (4 vis)

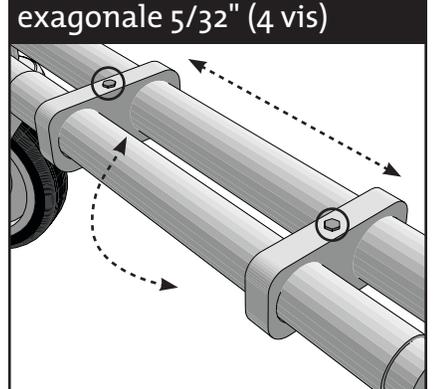

Les ajustements de la chaise peuvent être fait par les techniciens spécialisés de **Mécano Médic**.

Des vidéos montrant comment faire les ajustements sont aussi disponibles sur le site internet : mcanomedic.com.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contactez au : 450-504-9961